

www.sw-perfect.com

perfect® 深圳葆丰



黑金灵

预备效率极高的单支锉系统



精 / 致 / 塑 / 造 / 完 / 美



扫一扫公众号
获取葆丰更多产品资讯



扫一扫视频号
获取根管治疗相关知识

深圳市葆丰医疗器械有限公司
Shenzhen Perfect Medical Instruments Co., Ltd

邮箱: likee@dental-perfect.com

地址: 深圳市龙岗区横岗街道四联社区伟群路2号3栋103

电话: 0755-28540953 传真: 0755-28540953

20221107

黑金灵

预备效率极高的单支锉系统


- 黑晶体材料，热处理工艺，韧性强，极具灵活性。
- 使用单支成型锉即可完成高效预备，过程简单。
- 圆盾型尖端、1/4切边，顺应根管固有原始形态，安全可靠。

产品参数

功能锉	开口锉	疏通锉	成型锉	成型锉	成型锉
					
型号规格	20/.07	16/.02	25/.04	25/.06	35/.04
扭矩 _{N·cm}	3.0	2.0~5.0	2.0	2.5	2.5
转速 _{RPM}	300~350	300	350~400	350~400	350~400
横截面					
长度 _{mm}	19mm	21, 25, 31	21, 25, 31	21, 25, 31	21, 25, 31
配套A	16/.02	25/.04	2支装	适用于细小根管 安全可靠	
配套B	20/.07	25/.06	2支装	适用于较大根管 效率高	
配套C	20/.07	35/.04	2支装		
配套D	20/.07 25/.06	25/.04 35/.04	4支装	适用于多根管 灵活性高	

独特的横截面设计


- **2个主切削刃** 切削效率高
- **1/4切边设计** 提高碎屑的清理，增强器械的保护，降低器械分离的风险，提高根管走向的切割效率以及排屑能力。

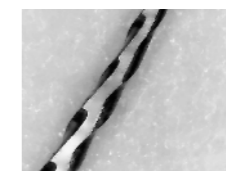

单支锉系统优势

- 器械使用减少，预备成形时间缩短。
- 根管锉材质、性能过硬，安全、高效。
- 消毒、清洗、储藏方便，节省更多人力。

省时
省心
省力

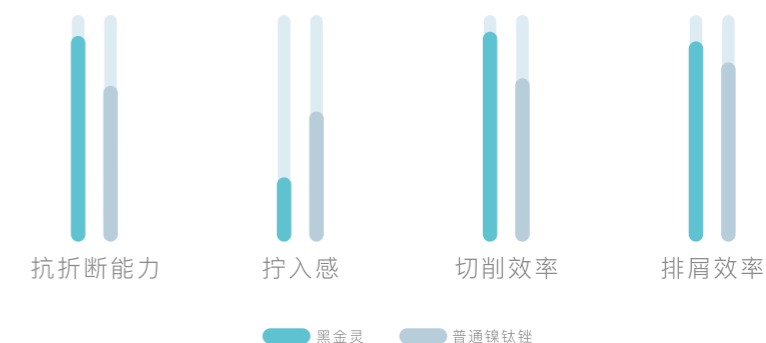

操作方法

1. 根据术前X线片确定工作长度；
2. 将冲洗液放入髓腔进行冲洗；
3. 将黑金灵缓慢进入根管，上下提拉，幅度不超过3mm，稍施加压力，每3次提拉后退出，直至预备工作长度；
4. 在根管预备过程中，每次退出运动，都要使用次氯酸钠溶液充分清洗，并用手用不锈钢08#或10# K锉通畅至工作长度。