



扫一扫公众号
获取葆丰更多产品资讯



扫一扫视频号
获取根管治疗相关知识

乳牙锉


乳牙的 安全小帮手

横截面:



材料: 镍钛合金 颜色: 金色 长度: 16 mm
包装规格: 6 支/盒 (板) 混装/单装 灭菌: ≤134℃

型号、规格	扭矩	转速	ISO Color
15/.04	1.5~3.0N·cm	200-350(rpm)	□
20/.04	1.5~3.0N·cm	200-350(rpm)	■
25/.04	1.5~3.0N·cm	200-350(rpm)	■
30/.04	1.5~3.0N·cm	200-350(rpm)	■
25/.06	1.5~3.0N·cm	200-350(rpm)	■
30/.06	1.5~3.0N·cm	200-350(rpm)	■

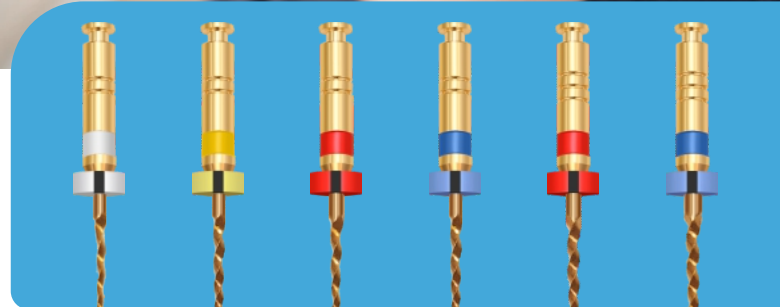

KIDDO



圆盾尖端设计, 无切削功能,
避免对乳牙根尖周组织的刺
激和损伤。



锉针长度仅为16mm, 适合儿童开口度和
乳牙根管长度, 适用于儿童乳牙根管治疗

深圳市葆丰医疗器械有限公司

地址: 深圳市龙岗区横岗街道四联社区伟群路2号3栋103
电话: 0755-28540953 传真: 0755-28540953

www.sw-perfect.com



乳牙锉

乳牙的安全小帮手

perfect®

深圳葆丰

安全、高效、简单

SAFE EFFICIENT EASY



短螺纹设计, 适应儿童牙齿的短根管
高效的保护了儿童牙齿脆弱的根管壁
三角形横截面, 切削高效, 便于排屑

操作方法

(1) 使用#10、#15不锈钢K锉, 疏通根管, 到达工作长度, 反复进入几次, 建立一个可重复进入的光滑通道, 测量工作长度, 大量次氯酸钠冲洗;

(2) 使用15/.04, 向根管壁施加横向力, 以“刷”的手法扩大根管的横截面积, 每向下预备1mm, 向上短促提拉镍钛锉, 准备预备出根尖1/3处, 遵循根管原始解剖形态, 谨慎预备根管尖部, 避免根尖发生根管偏移, 大量次氯酸钠冲洗, 并用#15不锈钢K锉疏通, 捣碎碎屑, 再冲洗, 保持根管清洁、润滑;

(3) 使用20/.04, 向根管壁施加横向力, 以“刷”的手法扩大根管的横截面积, 每向下预备1mm, 向上短促提拉镍钛锉, 准备预备出根尖1/3处, 遵循根管原始解剖形态, 谨慎预备根管尖部, 避免根尖发生根管偏移, 大量次氯酸钠冲洗, 并用#15不锈钢K锉疏通, 捣碎碎屑, 再冲洗, 保持根管清洁、润滑; (根管较细的后牙, 根管至此可结束预备)

注意: 遇细小弯曲根管, 则预备到25/.04或25/.06, 如遇粗大根管, 则预备到30/.04或30/.06。

